


Så er hjertestarteren installeret og klar til brug



Hjertestarteren er placeret på **FREDSKOVVEJ ØST 4** – på gavlen af skuret nær vejen.

Hjertestarteren er oplyst (Grønt lys + spot) om aftenen/natten. Den er desuden opvarmet, når det er koldt, af hensyn til funktionsevnen (batteriet).

Ved siden af hjertestarteren er placeret en let forståelig vejledning, som ses herunder.

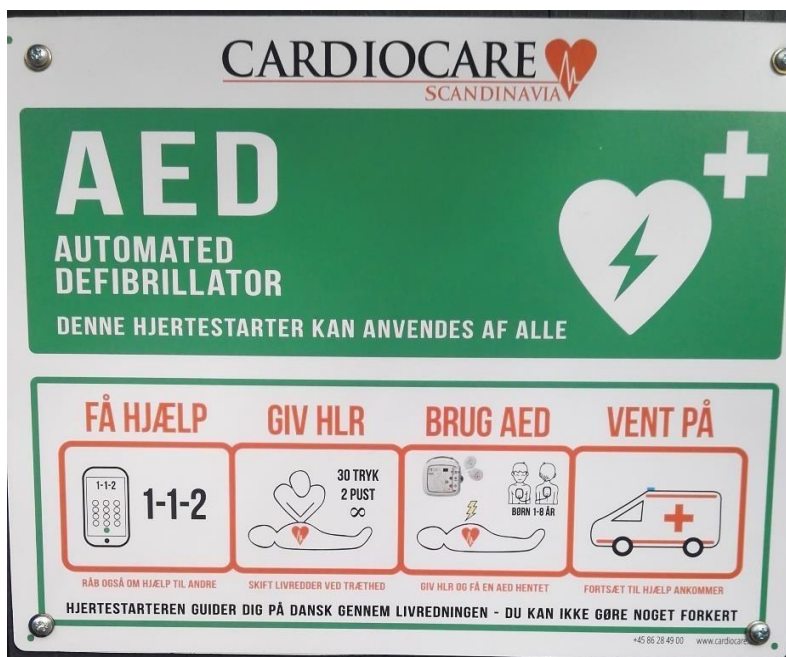

Det skal understreges, at hjertestarteren ikke i sig selv er livreddende, men den giver en grundig instruktion I DEN MEGET VIGTIGE HLR (Hjerte-Lunge Redning), og om nødvendigt elektriske stød, der kan igangsætte et standset hjerte og muliggør en livredning. Alt sammen guidet højt og omhyggeligt på dansk af Hjertestarteren.



DU KAN IKKE GØRE NOGET FORKERT

(OBS: Når du drejer det grønne låg af, er der én lille sort hylér til højre, der giver signal fra sig. Tryk på den lille grå knap oven på "hyleren", så stopper det.)



Inde i den grønne runde boks hænger en orange taske. Når den åbnes, ligger hjertestarteren inde i tasken – den ser sådan ud. Lidt større end en gammel stor telefonbog.


Næste side indeholder en lille gennemgang af knapperne på apparatet.

Elektroderne ligger i en lille skuffe i bunden af apparatet.

I et rum i låget på den orange taske ligger der en pose med bl.a. saks og barbermaskine:

- **Saksen** til at **klippe tøjet at overkroppen**, hvis det ikke kan rives af
- **Barbermaskinen** til – om nødvendigt - **at barbere hårene af patienten**, således, at **elektroderne kan sidde fast og har en god forbindelse til huden**

2. Apparatets funktioner og indhold

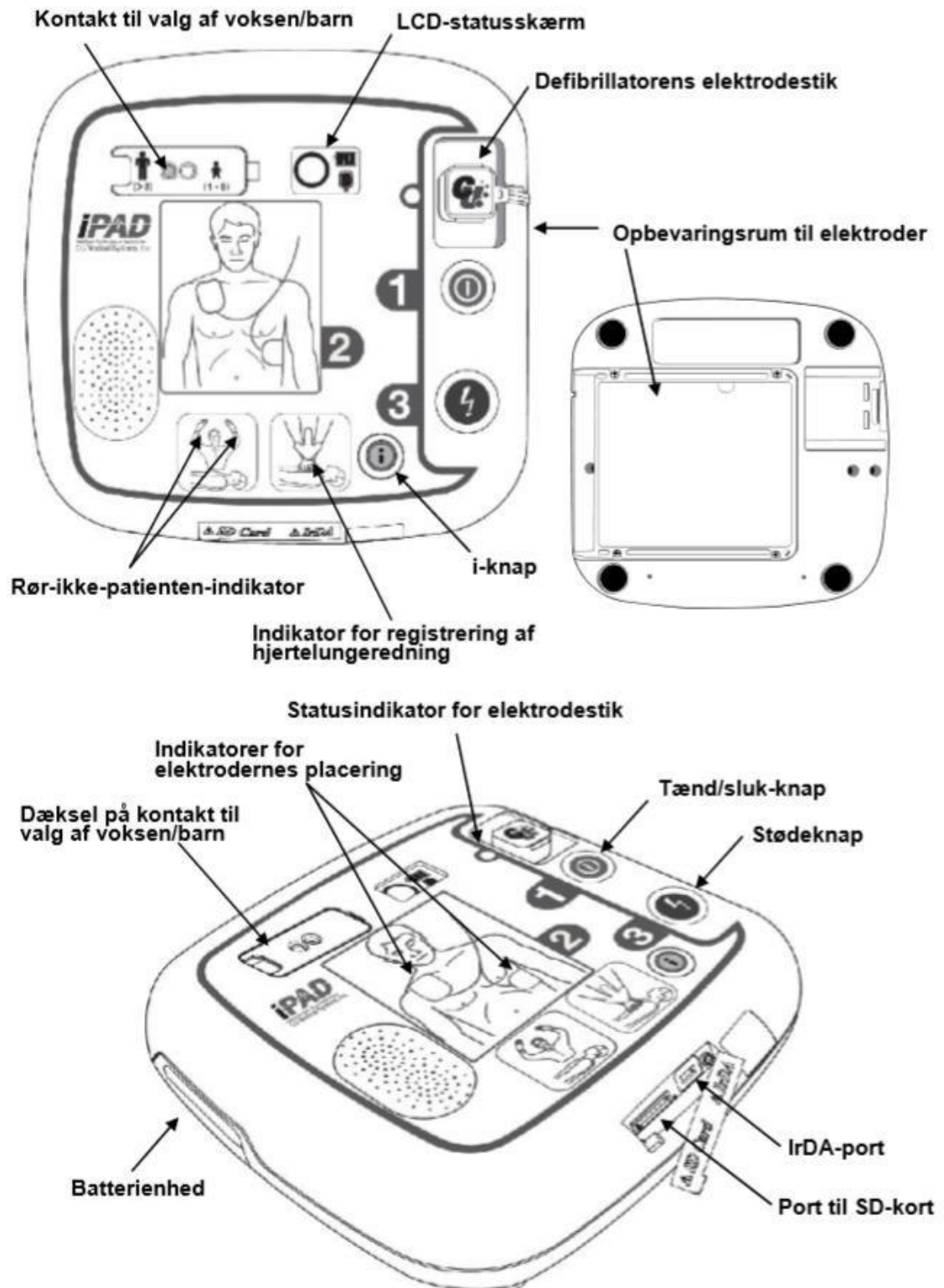

Det er vigtigt at huske:

1. Undersøg patienten – vejrtrækning og udseende
2. Tilkald 1-1-2 og tilkald hjælpere
3. Iværksæt **HLR** = **H**jerte-**L**unge-**R**edning (Lær det..!)
4. Fremskaf Hjertestarteren – start den og følg instruktionerne.
Barber - om nødvendigt - de områder, som elektroderne skal sidde på.
5. **RØR IKKE PATIENTEN NÅR APPARATET SIGER DET** – risiko for kraftigt stød..!!!
6. Fortsæt til Professionel hjælp kommer til
7. Bring hjertestarteren tilbage til boksen.
8. **Ring 24237955 og meddel, at hjertestarteren har været i brug,** så den hurtigst muligt kan få et frisk batteri, og nye elektroder.

Instruktionsvideoer:

2 gode og grundige Falck- instruktioner, samt en rigtig realistisk video fra Solna i Stockholm – den ender godt, vil jeg skynde mig at sige..!

<https://www.youtube.com/watch?v=yCU3m8f5-Pk>

<https://www.youtube.com/watch?v=b044R6tbuU>

https://www.youtube.com/watch?v=ZXNQ_aUJu7A

Fredskoven, april 2018 – revideret juli 2020

Jan Wolfram Thiemann